


Twin Jection

Abformung innovativ


innovative impression taking

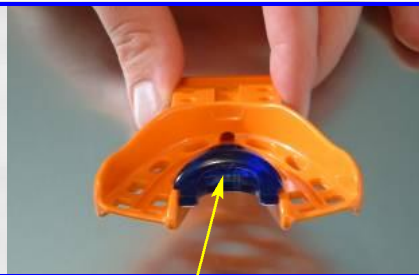

Twin Jection Löffel, hier OK - mit aufsteckbarem Gaumenteil - falls benötigt
Twin Jection Tray - upper version with its removable palatal



anatomische Formgebung hier : "Spee'sche Kurve"
anatomical construction: the curve of "Spee"

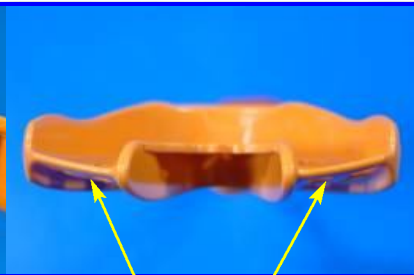

anatomische Formgebung hier: "Wilson Kurve"
anatomical construction: the curve of "Wilson"

farbiger Arbeitslöffel coloured tray


glasklarer Löffel translucent tray



der Löffel für UK Präparationen
the lower tray



geeignete Größe im Mund aussuchen
check the right size in patient's mouth

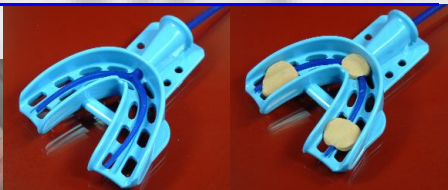

Platzhalter in Arbeitslöffel eingelegt
placemaker in its position



mit Putty fixiert - aushärten lassen
fixed with putty let it harden



Vorabformung VOR der Präparation, das schafft Platz für die Korrekturmasse
shore Härte von Putty um die 70 !
first impression taken **before** the preparation, that creates the space for the correcting material

die Korrekturabformung: Korrekturmasse **mittelviskos !**
the correcting impression taking: material **medium** viscosity !

das erste Ergebnis the first result

Entfernen des Platzhalters
remove the placemaker

Freischneiden - zum Kanal hin
the opening to the injection channel

zunächst den Kanal füllen
first fill the channel

Auftragen auf beide Okklusalfächen
put it on both occlusal sides



die Präparationsgrenzen umspritzen
put it on the prepared teeth borders




Abformung zurück setzen. Nur noch ein "Schuss" Korrekturmasse
reset the impression. just one "shot" of correcting material



Gesichtsbogentransfer während des Aushärtens
facebowtransfer while the material is hardening



das Ergebnis Präp. Seite
the prep. side result

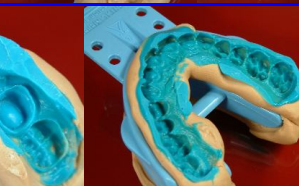


Kaufläche Gegenkiefer
occlusion of the counter

Dental Kiefer


www.dental-kiefer.com

Tel. 00 333 88 89 40 30
Fax. 00 333 88 89 47 02

Stand Juli 2010 - technische Änderungen vorbehalten

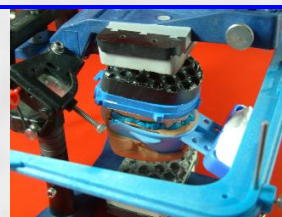

Löffel dient nun auch als Bissgabel !
Twin Jection serves as a bite fork too !

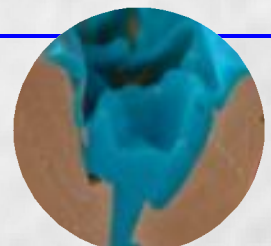

Schnittbild zeigt und erklärt das Funktionsprinzip
you see, how the correcting material flew over that tooth